

## SPLINT PADDING AND LINING MATERIALS SOFT VELVET EDGING STRIP

### A. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

SOFT VELVET EDGING STRIP est un matériau de doublure textile mince, doux, extensible, élastique et auto-adhésif. Il est utilisé comme matériau de finition sur les orthèses, les dispositifs d'immobilisation externes et les aides à la réadaptation.


### B. GAMME DE PRODUITS

SOFT VELVET EDGING STRIP est disponible en rouleaux de 1 mm (1/25") épaisseur x 25 mm (1") largeur x 2500 mm (8' 2.5") longueur

| N° d'art. | Couleur |
|-----------|---------|
| 35116     | noir    |

### C. PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

- \* Tirez l'extrémité libre de la bande de finition hors de l'incision de l'emballage et coupez la longueur de matériau requise avec une paire de ciseaux appropriée.

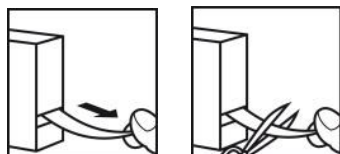

- \* Retirez la feuille de protection de la face arrière (auto-adhésive) de la bande et collez le SOFT VELVET EDGING STRIP sur les bords de l'orthèse après la coupe.

- \* Assurez-vous que la moitié de la bande recouvre la surface intérieure du bord de l'orthèse et que l'autre moitié recouvre la partie extérieure du bord de l'orthèse.
- \* La SOFT VELVET EDGING STRIP peut toujours être facilement retirée immédiatement après l'application. Après un moment, ce sera difficile.

### D. ENTRETIEN ET GESTION DES DÉCHETS

La SOFT VELVET EDGING STRIP doit être nettoyée tous les jours. Utilisez de l'eau tiède et du savon désinfectant ou des lingettes d'isopropanol préalablement humidifiées. Bien rincer et bien sécher.

#### ! Ne jamais utiliser de solvants.

La stérilisation des thermoplastiques à basse température avec SOFT VELVET EDGING STRIP dans un autoclave est impossible. La stérilisation par traitement au gaz est possible. La désinfection est possible avec de l'alcool, de l'ammonium quaternaire ou une solution de savons de désinfection du commerce (HAC®, Sterilium®, etc.).

Après utilisation, l'orthèse peut être jetée avec les ordures ménagères sans nuire à l'environnement.

### E. INFORMATION ADDITIONNELLE

Pour plus d'informations telles que les informations de contact des distributeurs, les brochures sur les produits, les fiches de données de sécurité et les informations réglementaires, visitez notre site web [www.orfit.com](http://www.orfit.com).

#### Note:

Il est interdit d'apporter des modifications à ce texte sans l'accord préalable d'Orfit Industries.



**ORFIT INDUSTRIES**  
Vosveld 9A | B-2110 Wijnegem | Belgium  
T (+32) (0)3 326 20 26  
[welcome@orfit.com](mailto:welcome@orfit.com)

[www.orfit.com](http://www.orfit.com)



Ref. No. 50081FR  
VERSION 5  
LAST UPDATE: 06/01/2023  
REVISION DATE: 06/01/2025