

# Reinigung und Desinfektion von Orfit-Masken und Hardware

## Hygienemaßnahmen zum Schutz der Gesundheit von Patienten und Personal

Mit dem neuartigen Corona-Virus ist eine ausgezeichnete Hygiene wichtiger denn je geworden. Wir von Orfit möchten Ihnen dabei helfen und Sie über die besten Möglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion der Orfit-Masken und -Hardware in Ihrer Einrichtung informieren.

In dieser Zeit sollte man ganz besonders auf die Hygiene achten, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, sowohl im Interesse der Patienten wie auch des Personals.

Deshalb...

### **Halten Sie Masken und Hardware sauber und desinfiziert!**

Alle Orfit-Masken und -Hardware (Kissen, Basisplatten, Kopfstützen...) können mit Desinfektionsmitteln auf Isopropanol- und Ethanolbasis mit einem weichen Tuch aufgetragen, gereinigt und desinfiziert werden.

Achten Sie darauf, verschmutzte Orfit-Masken regelmäßig zu reinigen! Dabei wird eine Schicht mit abgestorbenen Bakterien, die sich auf der Maske gebildet haben könnten entfernt und Sie erhalten dadurch eine frische Oberfläche mit erneuter antibakterieller Wirkung.

**Anmerkung zu COVID-19:** Die [Weltgesundheitsorganisation](#) empfiehlt, dass „Oberflächen in allen Einrichtungen, in denen COVID-19-Patienten versorgt werden (Behandlungs- und Pflegeeinheiten), mindestens einmal täglich und bei der Entlassung eines Patienten gereinigt werden sollten“.

Zurzeit empfiehlt die WHO die Verwendung einer 70%igen Ethylalkohol-Lösung zur Desinfektion kleiner Flächen zwischen den Anwendungen. Natriumhypochlorit mit 0,5% (entspricht 5000 ppm) kann zur Desinfektion von Oberflächen verwendet werden. Lesen Sie die [vollständige Veröffentlichung](#) der WHO zum Thema Hygiene.

## **Geeignete Produkte zur Reinigung und Desinfektion von Orfit-Materialien**

Verwenden Sie keine Aerosolsprays, ätzenden Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel! Vermeiden Sie Produkte mit Bleichmitteln, da diese Masken verfärben und die Beschichtung von Kopfstützen und Kissen beschädigen können!

Wenn Sie sich unsicher über Ihre Reinigungslösung sind, verwenden Sie diese bitte nicht und [kontaktieren Sie Ihren Orfit-Händler](#). Wir überprüfen für Sie, ob Ihre Reinigungslösung geeignet und sicher in der Anwendung ist und informieren Sie.

Beigefügte [Reinigungsanweisungen](#) zeigen die grundlegenden Orfit-Reinigungsrichtlinien auf einem Blick. Leiten Sie bitte dieses Dokument an alle beteiligten Personen weiter, um eine fachgerechte Reinigung und Desinfektion zu gewährleisten.

## **Wie oft müssen Orfit-Masken/Hardware gereinigt und desinfiziert werden?**

Wir empfehlen, die Reinigungsstandards und Richtlinien Ihres Krankenhauses strikt einzuhalten, um eine optimale Hygiene zu gewährleisten.